



DOCTOR'S
CHOICE
Pasión por el movimiento

Ficha Técnica



Saebo Stretch

férula dinámica

Descripción

- Una solución dinámica a un problema dinámico. Esta férula ayuda los pacientes con alteraciones neurológicas a mantener o mejorar el movimiento, al mismo tiempo minimiza el daño y el dolor en las articulaciones.
- Su tecnología de almacenamiento de energía permite que las personas que sufren espasticidad elonguen de forma cómoda y segura lo que genera mayor motivación para el cumplimiento de metas.



Tallas de laterales

S,M,L de izquierda y derecha

Beneficios

- ✓ **Previene** contracturas y dolor articular generado por las ortesis de reposo rígidas.
- ✓ **Potencia** la elongación de la musculatura flexora aprovechando las fluctuaciones del tono.
- ✓ **Antideslizante** Superficie de silicona para evitar migraciones además de canaleta proximal (antebraquial).
- ✓ **Correas** de sujeción en las articulaciones críticas.
- ✓ **Desarmable** para lavado (con detergente neutro y agua fría)
- ✓ **Sistema de pulgar** ajustable para permitir radial y palmar aducción / abducción.

Dimensiones:


- Con los dedos aducidos mida directamente a través de la segunda a la quinta falange proximal.



S: 5,7cm a 7 cm
M: 7cm a 8,3 cm
L: 8,3cm a 10,2 cm

- Si aún no se decide por una talla, entonces proceda a medir la longitud del dedo más largo. Si el paciente tiene los dedos largos considere siempre una talla más y a modo de referencia la férula de acuerdo a la talla posee las siguientes dimensiones.

XXS: 23 cm M: 33 cm
XS: 25,4 cm L: 36,2 cm
S: 29,21 cm

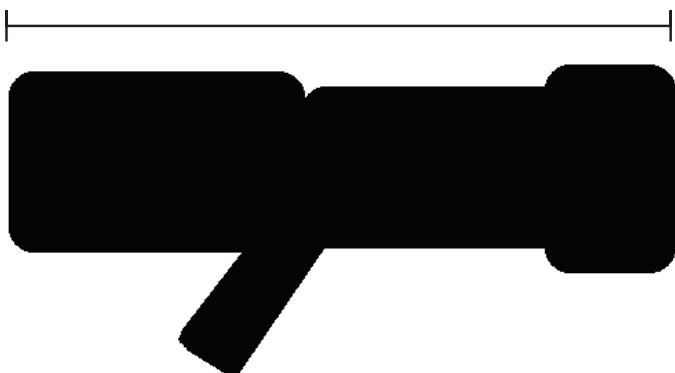

Incluye tres piezas dinámicas de mano intercambiables que pueden acomodar diversos niveles de espasticidad.



+562 24459340

@doctorchoicechile

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl

doctorschoice_chile