


Órtesis para pie caído

AFO LEAF SPRING®

Descripción

- **AFO Leaf Spring** es una ortesis de tobillo-pie de polipropileno prefabricada diseñada para soportar el pie caído flácido.

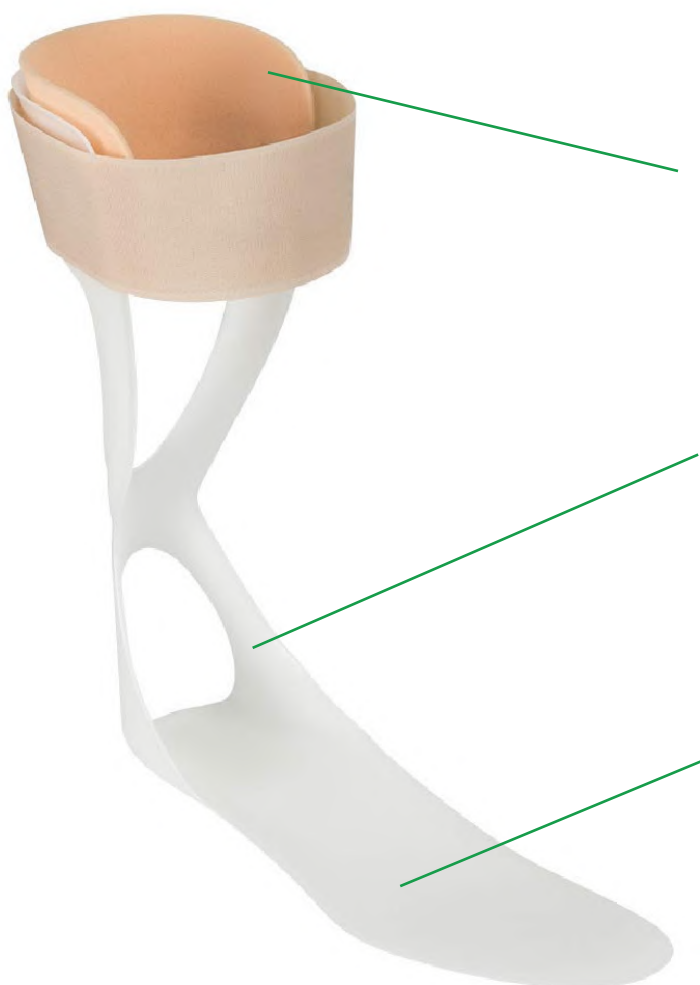

DISEÑO FUERTE: moldeado con un material de polipropileno ligero y flexible, lo que lo hace duradero.

FÁCIL DE USAR: el espacio para los dedos bien diseñado y la ausencia de una sección del talón ofrecen comodidad, soporte y la flexibilidad para usar una variedad de zapatos diferentes.

FLEXIBILIDAD: la suela fina es flexible y fácil de recortar para un ajuste personalizado.

Recomendado para:

- Tratamiento de pie caído secundario a ACV, pie caído moderado de otras enfermedades neurológicas.

Talla	Longitud del reposapiés	Altura	Talla zapato
Small - Medium	24 cm	27 cm	36 - 39
Large	28 cm	30 cm	39.5 - 45



Instalación y uso

- 1° Si el zapato tiene plantilla retírela.
 - 2° Ajuste la base de la órtesis recortando el exceso de material. Para que la órtesis no se deslice dentro del zapato cerciőrese que cubre completamente el interior del zapato.
 - 3° Ponga la plantilla, y solicite al paciente que calce el zapato.
 - 4° Compruebe si existen puntos de presión excesiva y si fuese necesario, retire la órtesis de la pierna del paciente aplique un poco de calor (< 90°) y ajústela para evitar dichos puntos.
 - 5° Si lo desea añada material de almohadillado a la órtesis, remaches y velcros.
- Contraindicada en pie equino severo, deformidades tobillo-pie, inestabilidad medio-lateral, necesidad de órtesis a largo plazo y espasticidad



+562 24459340

@doctorchoicechile

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl @doctorschoice_chile